

VITAVM.11

Information produit



Prise de teinte VITA

Communication de la teinte VITA

Reproduction de la teinte VITA

Contrôle de la teinte VITA

Édition 08.13

VITA shade, VITA made.

VITA

Céramique à structure fine pour la
personnalisation de VITA SUPRINITY.

Céramique à structure fine pour la personnalisation de VITA SUPRINITY

VITA VM 11 est une céramique feldspathique à structure fine et basse fusion. Elle a été mise au point spécialement pour la personnalisation des restaurations en céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS).

La nouvelle génération de céramique vitreuse impose de nouvelles exigences aux céramiques cosmétiques en matière de CDT. Les CDT précisément harmonisés du matériau d'infrastructure et du matériau cosmétique assurent une excellente cohésion et sécurise les résultats, tout en évitant les déformations et réduisant les tensions au sein de l'incrustation.

Les avantages du produit



Restaurations d'une grande esthétique :

la forte translucidité et les couleurs chaudes de VITA VM 11 conjuguées à l'opalescence de VITA SUPRINITY donnent un résultat très esthétique et un jeu de couleurs dynamique.

Cohésion sûre :

la parfaite harmonisation des deux plages de CDT garantit une cohésion sans tension et donc sûre.

Remarquable aptitude à l'usinage et au polissage :

avec la fameuse structure fine que possède VITA VM 11, la surface obtenue est lisse et bien dense. Elle se fraise et se polit aisément.

Mise en œuvre simple :

VITA VM 11 se caractérise par une remarquable tenue, un retrait minime et une grande solidité des bords, en association avec VITA SUPRINITY, il est possible grâce à la remarquable mouillabilité de surface de la nouvelle céramique vitreuse, d'effectuer directement le montage cosmétique sans liner ou lait.

Stabilité de premier ordre à la cuisson :

VITA VM 11 est dotée de propriétés à la cuisson de tout premier ordre et conserve sa forme même après plusieurs cuissons.


Assortiments
VITAVM®11 DENTINE KIT, BV11DKC

Quantité	Contenu	Matériau
8	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, D2
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Mode d'emploi


VITAVM®11 CREATIVE KIT, BV11CK


Quantité	Contenu	Matériau
3	12 g	SUN DENTINE SD1-SD3
2	12 g	MAMELON MM1, MM3
7	12 g	EFFECT ENAMEL EE1, EE3, EE5, EE7, EE8, EE9, EE11
3	12 g	EFFECT CHROMA EC1, EC5, EC11
1	12 g	EFFECT PEARL EP1
4	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO3, EO5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL, NT
1	12 g	WINDOW, WIN
1	50 ml	LOW FUSING MODELLING LIQUID
		Mode d'emploi

Poudres à l'unité
VITAVM®11

Couleur	Matériau	Contenu	N° art.
0M1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4906112
A1	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945112
A2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945212
A3	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945312
A3.5	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945412
B2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4945712
C2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946112
D2	TRANSPA DENTINE	12 g	B4946412
WIN	WINDOW	12 g	B4918112
NT	NEUTRAL	12 g	B4920112
ENL	ENAMEL light	12 g	B4919112
END	ENAMEL dark	12 g	B4919212
MM1	MAMELON	12 g	B4916112
MM3	MAMELON	12 g	B4916312

Couleur	Matériau	Contenu	N° art.
EP1	EFFECT PEARL	12 g	B4915112
EO1	EFFECT OPAL	12 g	B4917112
EO2	EFFECT OPAL	12 g	B4917212
EO3	EFFECT OPAL	12 g	B4917312
EO5	EFFECT OPAL	12 g	B4917512
EC1	EFFECT CHROMA	12 g	B4912112
EC5	EFFECT CHROMA	12 g	B4912512
EC11	EFFECT CHROMA	12 g	B4913112
EE1	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909112
EE3	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909312
EE5	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909512
EE7	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909712
EE8	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909812
EE9	EFFECT ENAMEL	12 g	B4909912
EE11	EFFECT ENAMEL	12 g	B4910112
SD1	SUN DENTINE	12 g	B4936112
SD2	SUN DENTINE	12 g	B4936212
SD3	SUN DENTINE	12 g	B4936312


Le système inédit VITA SYSTEM 3D-MASTER permet de définir d'une manière systématique toutes les couleurs de dent naturelles et de les reproduire intégralement.

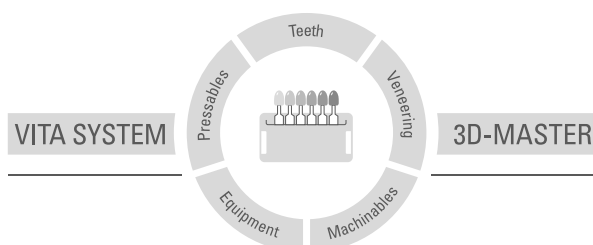

N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés. De plus, notre responsabilité quant à l'exactitude de ces données, indépendamment des dispositions légales, et dans la mesure où la loi l'autorise, se limite en tous cas à la valeur de la marchandise livrée selon facture hors taxes. En particulier et dans la mesure où la loi l'autorise, notre responsabilité ne peut, en aucun cas, être engagée pour les pertes de bénéfices, pour les dommages directs ou indirects, pour les recours de tiers contre l'acheteur. Toute demande de dommages et intérêts pour faute commise (faute lors de l'établissement du contrat, entorse au contrat, négociations illicites etc.) n'est possible qu'en cas de préméditation ou de négligence caractérisée. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit.

Édition de cette information : 08.13

Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié selon la directive sur les dispositifs médicaux et les produits suivants portent le marquage  0124 :

VITAVM[®]11 · VITA SUPRINITY[®]

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik